
# 施術用衣服 「大阪」 「「「「大阪」」 「「「大阪」」 「「「大阪」」 「「大阪」」 「「大阪」 「「大阪」」 「「大阪」」 「「大阪」 「「大阪」」 「「大阪」 「「大阪」」 「「大阪」 「「大阪」」 「「大阪」」 「「大阪」 「「大阪」」 「「大阪」」 「「大阪」」 「「大阪」 「「大阪」」 「「大阪」」 「「大阪」」 「「大阪」 「「大阪」」 「「大阪」 「「大阪」 「「大阪」」 「「大阪」 「「大阪」 「「大阪」」 「「大阪」 「「大阪」 「「大阪」」 「「大阪」 「「大阪」 「「大阪」 「「大阪」 「「大阪」 「「大阪」」 「「大阪」 「「大阪」」 「「大阪」 「「大阪」 「「大阪」」 「「大阪」 「「大阪

# 取り扱い説明書

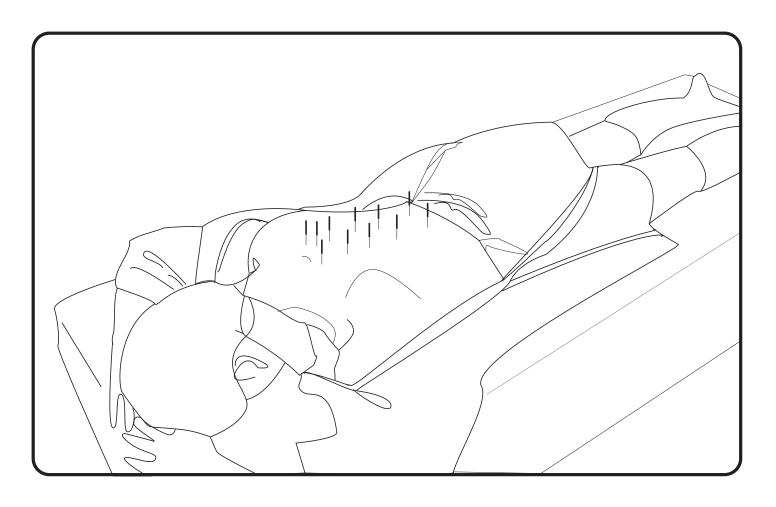

® I = 7 7 8 I =

使い方動画集を ご覧いただけます

### 〇 エニケア®取扱説明書

この度は、当製品をご購入いただきまことにありがとうございます。

エニケア®は、あらゆる状態の方のケアをできるように設計された 新しいタイプの患者着です。

(特許第6564968号·商標第6206457号「エニケア®」)

正しくご利用いただけるように、取り扱い説明書をお読みください。

なお、お読みになられた後は大切に保管してください。

ご購入 年 月 日

# 使用上のご注意

- 布製品の為、それぞれ色落ち、縮み、縫製などの違いがあります。
- 特殊構造の為、無理な引っ張りなどで破損する場合があります。
- 金属アレルギーに対応した商品ではありません。
- 洗濯は、製品のチャックを必ず閉め ネットにいれ、塩素系漂白剤を使わずに洗濯してください。



○ 製品の構造上、紐のように細く輪になる箇所があります。(袖部分の解放時) 着脱衣で身体不自由な方や高齢者などの場合は、作業者が完全に作業を終わらせて下さい。 ファスナーなどを開けた中途半端なまま放置しないようにしてください。 四肢や首に絡まりなどを起こし 窒息や落下等の事故を未然に防ぐ為に 必ず守りましょう。

# 使用方法


- 〇 基本的な構造
  - チャックは、前後見頃の両脇、袖下の左右6本です。(オプションでファスナー・スライダー数の変更可能)
  - 各チャックは、上下にスライダーが付いてます。
  - スライダーは、好きなところまで開けることができます。
  - ・必要部分だけを開け、保温や清潔・安全を確保できます。
- 処置や施術等で一部を露出する場合
  - スライダーを希望の位置まで開けると身体の一部を露出することができます。
  - ・襟元と裾にスライダーがあります。
  - ・上胸部の露出は脇の位置を目安に開けてください。第3肋骨あたりまで開けられます。
  - お腹部分は裾から開けて下さい。同様に、背面も開けられます。
  - 側臥位で、側胸・側腹への施術も行えます。
  - 衣服パーツがバラバラに散乱しないように 一部が連結されたままの設計です。
  - ・指圧・マッサージが行いやすいように 正中線に縫い目がない設計です。
- 腕が外れ、襟元の開閉範囲も変えられます。 身体に不自由がある方の着脱衣がしやすい作りになっています。訪問鍼灸にご利用ください。

# お問い合わせ

○製品に関しては、下記にお問い合わせください。


メールアドレス info@sascreate.com

電話(平日午前10時~午後5時) 090-8161-8458 担当 竹守(タケモリ)

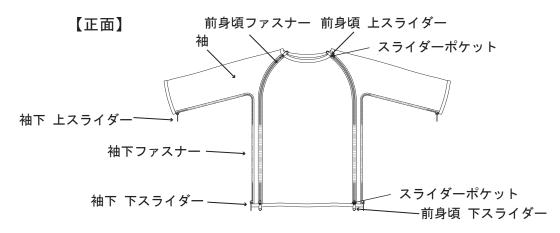





3本(計6本)のファスナーによる開閉構造の特徴で特許取得。 前ファスナー、袖下ファスナー、後ファスナーの開け方次第で 状況に合わせた何通りもの使い方が可能です。(特許第6564968号)

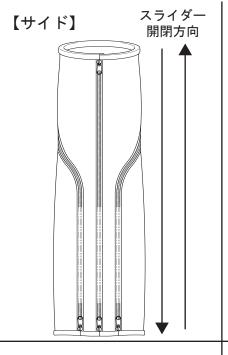


【各ファスナー上下に スライダー】

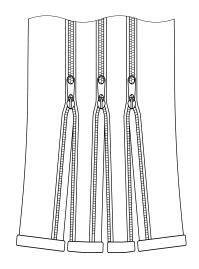

### 【前後ファスナーを開けると腕が外れます】

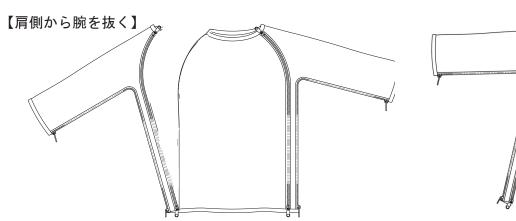

※ ファスナーを上から開ける(裾側が連結状態)

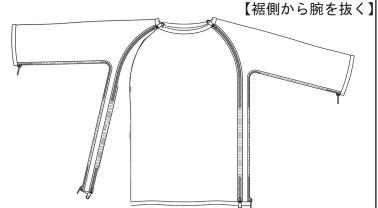


※ ファスナーを下から開ける(首側が連結状態)



この機能が、当製品の一番の特徴です。ファスナーの開け方の組み合わせ次第で 一般衣服よりケアしやすくなります。着脱介護・施術・処置の際に便利です。 必要に応じてご利用ください。安全の為のスライダーポケットもついています。

### 【使い方 一例】

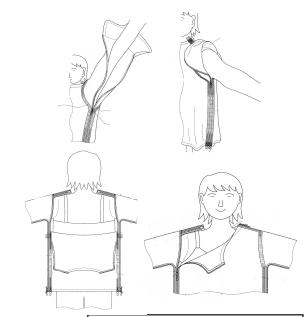



肩・胸・腰・脇・腹・腕等 仰臥位・側臥位・伏臥位の いずれの体位でも処置可能